

BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DU RAYPLICKER HANDY



- ✓ LES BORDS GRIS PARALLÈLES AUX BORDS DE L'IMAGE
- ✓ BOUCHE OUVERTE ET RESPIRATION PAR LE NEZ
- ✓ LIMITATION DE LA SALIVE
- ✓ DENT CENTRÉE, SANS ANGLE OU INCLINAISON
- ✓ EMBOUT SOUS LA LÈVRE
- ✓ EMBOUT EN CONTACT AVEC LES DENTS ADJACENTES
- ✓ EMBOUT EN CONTACT AVEC LA GENCIVE
- ✓ NE PAS BOUGER LE TEMPS DE L'ACQUISITION (1s)

MAUVAISES PRATIQUES

EMBOUT MAL POSITIONNÉ



BOUCHE FERMÉE



CONDENSATION




PRESSION EXCESSIVE SUR LA GENCIVE



DENT MAL CENTRÉE



MAUVAIS ANGLE

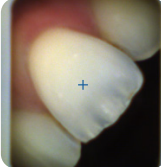

MAUVAISE INCLINAISON



LÈVRE VISIBLE



EMBOUS DE CALIBRATION

LE NON RESPECT DES PROCÉDURES DE DÉSINFECTION ET STÉRILISATION PROVOQUE UNE DÉGRADATION PRÉMATURÉE DES EMBOUTS.

UN EMBOUT DE CALIBRATION DÉGRADÉ (DÉCOLORATION, ASPECT MODIFIÉ,...) DOIT ÊTRE CHANGÉ.

DURÉE DE VIE VÉRIFIÉE POUR 100 PASSAGES DE CYCLE DE STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE.



EMBOUT ENDOMMAGÉ
Aspect interne et/ou externe brillant et collant



EMBOUT NEUF
Aspect interne et externe gris et mat

