

## CONSEJOS BÁSICOS PARA USAR RAYPLICKER HANDY



- ✓ BORDES GRISES PARALELOS A LOS DE LA IMAGEN
- ✓ BOCA ABIERTA Y RESPIRACIÓN POR LA NARIZ
- ✓ SALIVA LIMITADA
- ✓ DIENTE CENTRADO, SIN ÁNGULO O INCLINACIÓN
- ✓ PUNTA BAJO EL LABIO
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON EL DIENTE ADYACENTE
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON LA ENCÍA
- ✓ NO MOVERSE DURANTE LA ADQUISICIÓN (1s)

## MALAS PRÁCTICAS


**PUNTA MAL POSICIONADA**



**BOCA CERRADA**



**CONDENSACIÓN**

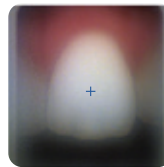


**PRESIÓN EXCESIVA EN LA ENCÍA**



**DIENTE MAL CENTRADO**



**ÁNGULO INCORRECTO**

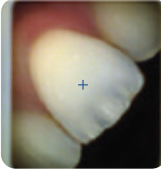

**INCLINACIÓN INCORRECTA**



**LABIO VISIBLE**



## PUNTAS DE CALIBRACIÓN

EL NO RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN PRODUCE UNA DEGRADACIÓN PRECOZ DE LAS PUNTAS.

UNA PUNTA DE CALIBRACIÓN DEGRADADA (DECOLORACIÓN, ASPECTO ALTERADO,...) DEBE SER CAMBIADA.

TIEMPO DE VIDA VERIFICADO PARA 100 PASES DE CICLOS DE AUTOCLAVE.



**PUNTA DAÑADA**



**NUEVA PUNTA**

