

CONSEJOS BÁSICOS PARA USAR RAYPLICKER HANDY



- ✓ BORDES GRISES PARALELOS A LOS DE LA IMAGEN
- ✓ BOCA ABIERTA Y RESPIRACIÓN POR LA NARIZ
- ✓ SALIVA LIMITADA
- ✓ DIENTE CENTRADO, SIN ÁNGULO O INCLINACIÓN
- ✓ PUNTA BAJO EL LABIO
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON EL DIENTE ADYACENTE
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON LA ENCÍA
- ✓ NO MOVERSE DURANTE LA ADQUISICIÓN (1s)

MALAS PRÁCTICAS


PUNTA MAL POSICIONADA



BOCA CERRADA



CONDENSACIÓN

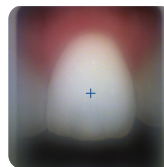


PRESIÓN EXCESIVA EN LA ENCÍA



DIENTE MAL CENTRADO



ÁNGULO INCORRECTO

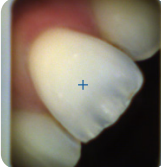

INCLINACIÓN INCORRECTA



LABIO VISIBLE



PUNTAS DE CALIBRACIÓN

EL NO RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN PRODUCE UNA DEGRADACIÓN PRECOZ DE LAS PUNTAS.

UNA PUNTA DE CALIBRACIÓN DEGRADADA (DECOLORACIÓN, ASPECTO ALTERADO,...) DEBE SER CAMBIADA.

TIEMPO DE VIDA VERIFICADO PARA 100 PASES DE CICLOS DE AUTOCLAVE.



PUNTA DAÑADA
apariciencia interna y gris exterior y mate



NUEVA PUNTA
apariciencia interna y gris exterior y mate

