



MISE À JOUR LOGICIEL VISION

Version 1.0.3

05.2022

RAYPLICKER VISION

ACCÉDER AU BOREA CONNECT Dr Margaux Bachelerie

PARAMÈTRES

Mises à jour logiciel RECHERCHER DES MISES À JOUR

Mise à jour disponible
Version 1.0.1 VOIR LES DÉTAILS **METTRE À JOUR**

Appareils Raypicker connectés RECHERCHER DES APPAREILS

Aucun appareil trouvé

Paramètres du logiciel

Système de numérotation
FDI

Format de date
Jour / Mois / Année (j/mn/aaaa)

Affichage du nom
Nom - Prénom

Emplacement du dossier d'import 3D PARCOURIR

Emplacement du dossier d'export des données PARCOURIR

Emplacement du dossier d'archives PARCOURIR

À propos

CE Marquage CE conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux de classe I.

1 Paramètres

2 METTRE À JOUR

Gérer Raypicker Vision Installer

Installation - Raypicker Vision

Bienvenue dans l'assistant d'installation de Raypicker Vision

3

- Ajouter ou supprimer des composants
- Mettre à jour des composants
- Supprimer tous les composants

4

Suivant > Quitter

Gérer Raypicker Vision Installer

Sélectionner des composants

Sélectionnez les composants que vous souhaitez mettre à jour.

5

Composant	Version actuelle	Version cible	Date de mise à jour
<input checked="" type="checkbox"/> Master	1.1.0-1	1.2.0-1	2022-03-17
<input checked="" type="checkbox"/> Vision	1.0.1-1	1.0.3-1	2022-04-22

6 Ce composant occupe 10,62 Mo sur votre disque dur.

Suivant > Annuler

Gérer Raypicker Vision Installer

Prêt à mettre à jour les paquetages

Le programme d'installation est maintenant prêt à mettre à jour votre installation. L'installation va utiliser 321,44 Mo de l'espace disque.

6

Ignorer > Annuler

Gérer Raypicker Vision Installer

Mise à jour des composants de Raypicker Vision






Téléchargement de l'archive "1.2.0-scontant.7z" pour le composant Master.

Archive: 4,30 sur 10,62 Mo (1,66 Mo/sec) - 3 second(s) restantes.

Total: 4,30 sur 137,78 Mo - 1 minute(s) restantes.

7

Annuler

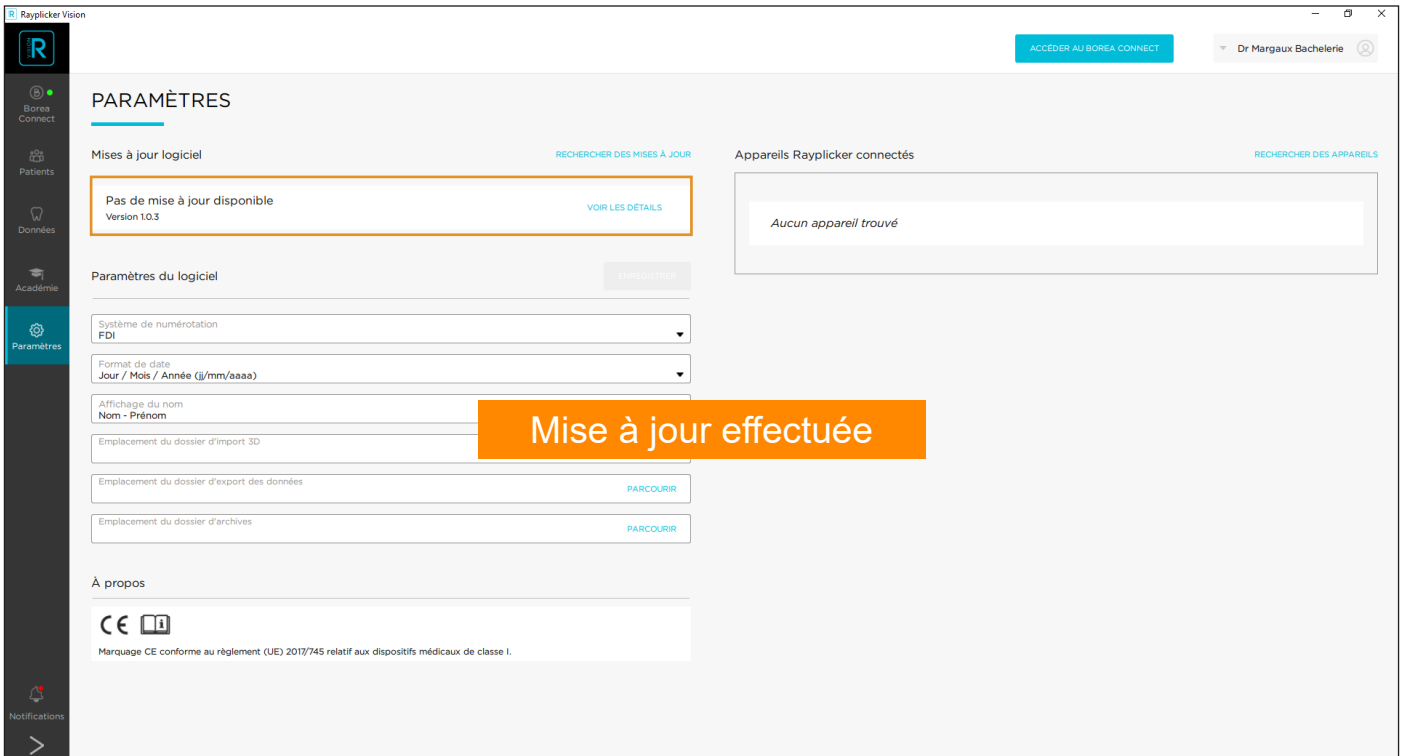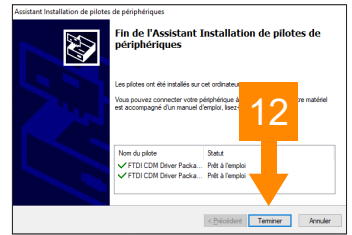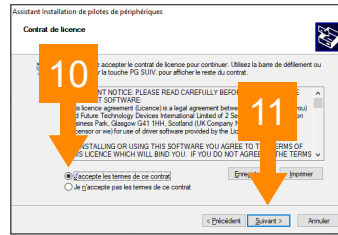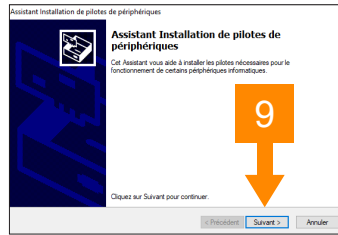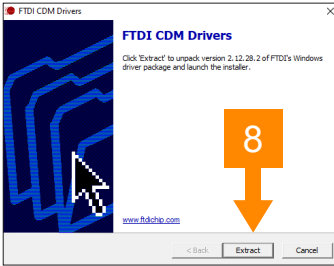

Procédure mise à jour logiciel Rayplicker Vision (Version 1.0.3)

BOREA SAS, 6 Allée Duke Ellington, 87100 Limoges Cedex, France.
 +33 (0)9 83 71 71 61 - contact@borea-dental.com - www.borea-dental.com