

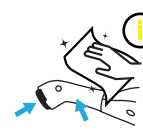



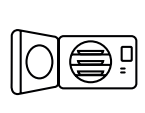






PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

PASOS	PUNTAS DE CALIBRACIÓN	DISPOSITIVO RAYPLICKER
- 1 - DESINFECCIÓN	<p>TOALLITAS PERMITIDAS (⚠)</p> <p>INT / EXT </p>	  <p>SECAR </p>
- 2 - ACLARADO	<p>ACLARAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA</p> <p>INT / EXT  </p>	
- 3 - ESTERILIZACIÓN	<p>ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE</p>  	

 Toallitas desinfectantes para superficies de dispositivos médicos no invasivos con propiedades bactericidas, fungicidas, virucidas y tuberculicidas. Siga las instrucciones del fabricante (tiempo de contacto necesario). Vea a continuación las áreas de riesgo.

 Este protocolo de desinfección del dispositivo, que es obligatorio después de cada uso para evitar la contaminación cruzada.

ÁREAS DE RIESGO EN CASO DE USO EXCESIVO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES

DISPOSITIVO	BASE DE RECARGA	CABEZA DE MEDICIÓN
		

PRODUCTOS Y PROCESOS NO CONFORMES

TOALLITAS MUY EMPAPADAS	SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN	BAÑO DE DESCONTAMINACIÓN	BAÑO DE ULTRASONIDOS
