





PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU RAYPLICKER COBRA

07.2023




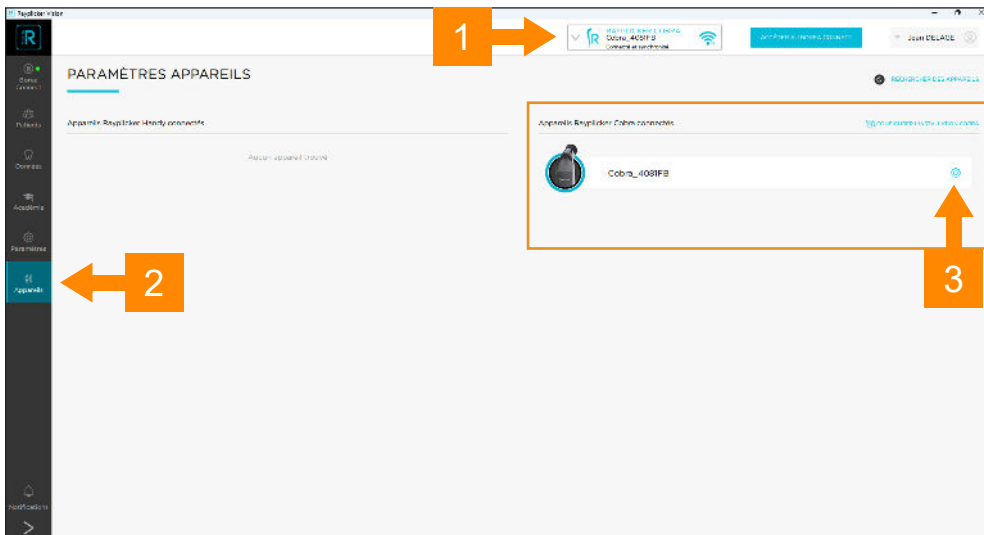

- 1 - Vérifiez que votre Raycliper Cobra est connecté et synchronisé
- 2 - Cliquez sur le menu “Appareils”
- 3 - Ouvrez les paramètres de votre Cobra connecté en cliquant sur l’icône de la roue crantée.

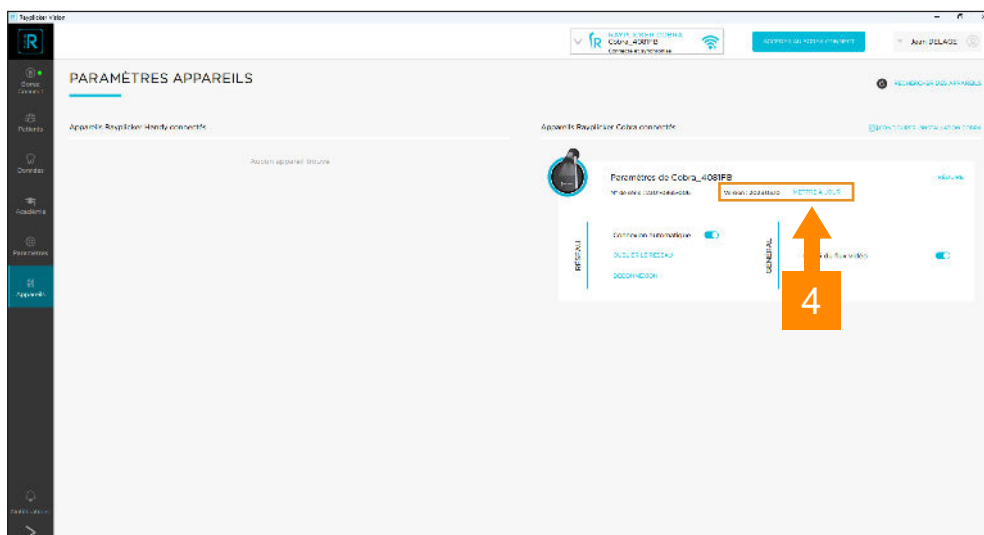

- 4 - Assurez-vous que votre cobra est sur l’écran d’accueil “R” et si une mise à jour est disponible, cliquez sur “METTRE À JOUR”

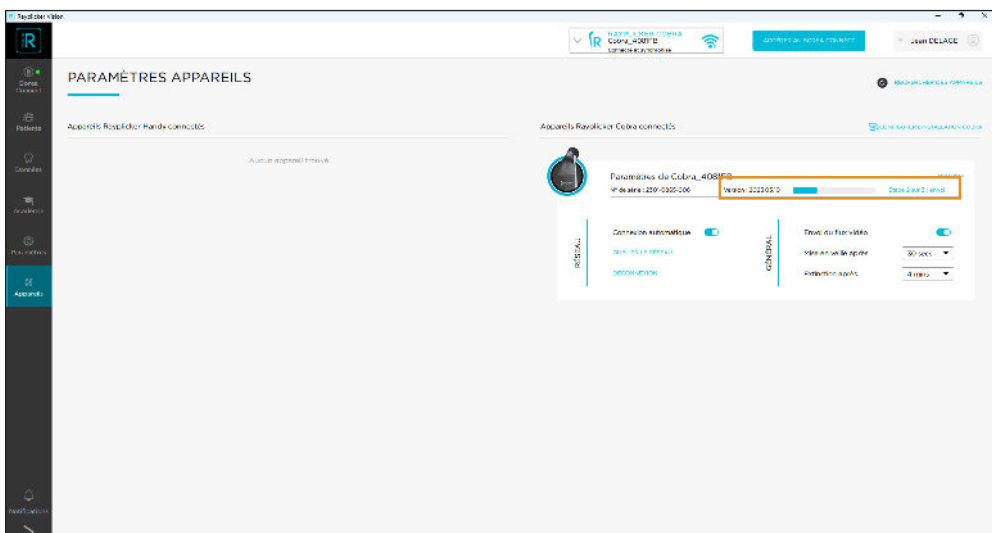

- 5 - La mise à jour se fait en trois étapes automatiques.

<p>Étape 1 - Téléchargement du micrologiciel sur le logiciel Rayplicker Vision.</p>	
<p>Étape 2 - Téléchargement du micrologiciel sur le Rayplicker Cobra.</p>	
<p>Step 3 - Mise à jour</p>	
<p>MISE À JOUR EFFECTUÉE</p>	<p>Ce message apparaît sur le logiciel Rayplicker Vision lorsque la mise à jour est terminée et réussie.</p> <div data-bbox="1011 1686 1294 1760" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Mise à jour terminée, l'appareil va redémarrer.</p> <p style="text-align: center;">CONTINUER</p> </div>

Procédure de mise à jour du Rayplicker Cobra

BOREA SAS, 6 Allée Duke Ellington, 87100 Limoges Cedex, France.
+33 (0)5 44 00 01 70 - contact@borea-dental.com - www.borea-dental.com